

# Quick and Easy

## HƯỚNG DẪN STEP-BY-STEP

### HƯỚNG DẪN GẮN PIVOT SL

#### BƯỚC 1

Sử dụng cây lắp SL tool, đẩy cửa qua vị trí mở.



#### BƯỚC 2


Đặt pivot SL vào dây cung và đẩy cửa vào vị trí đóng bằng ngón trỏ.



#### BƯỚC 3

Gắn lò xo CS4® vào pivot và siết cố định lại với hybrid screw.

#### HẠNG II

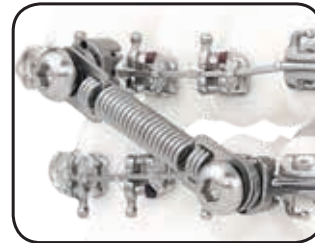

#### HẠNG III



**\*\*Pivot SL chỉ nên dùng với dây cung kích thước từ .016 x .025 tới .021 x .025**

#### LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Phải sử dụng active screw với pivot SL.

### HƯỚNG DẪN GẮN PIVOT TRUYỀN THỐNG

#### HẠNG II

#### BƯỚC 1

Đặt 2 pivot lên dây cung hàm trên, đặt pivot phía xa lên răng nanh hàm trên, gắn và buộc vào dây cung



HÀM TRÊN

#### HẠNG III

#### BƯỚC 1

Đặt 2 pivot lên dây cung hàm dưới, đặt pivot phía xa lên răng nanh hàm dưới, gắn và buộc vào dây cung



HÀM DƯỚI

#### BƯỚC 2

Ở ngoài miệng, lắp lò xo, screw và pivot lại với nhau. Đặt cả bộ vừa lắp vào dây cung hàm dưới. Gắn và buộc vào dây cung, đặt pivot phía gắn vào răng cối thứ nhất.



#### BƯỚC 2

Ở ngoài miệng, lắp lò xo, screw và pivot lại với nhau. Đặt cả bộ vừa lắp vào dây cung hàm trên. Gắn và buộc vào dây cung, đặt pivot phía gắn vào răng cối thứ nhất.



#### BƯỚC 3

Sử dụng kẹp để kéo căng spring eyelet vào pivot hàm trên và cố định lại bằng screw



#### BƯỚC 3

Sử dụng kẹp để kéo căng spring eyelet vào pivot hàm trên và cố định lại bằng screw

